

×

Neue Liste erzeugen

Name der Liste

Listen-Privatsphäre

List Icon

Abbrechen Senden

Drehkissen Transferhilfe



Drehkissen aus zwei Kisseanteilen, die um 360 Grad gedreht werden können, zum leichteren Umsetzen zuhause oder zum Ein- und Aussteigen ins Auto. Mit rutschsicherer Unterseite.

Preis

34,90 €

Beschreibung

– [Artikel gemerkt](#)

– [Artikel merken](#)

Dieses Kissen ist eine **praktische Transferhilfe**, die das Drehen des Körpers erheblich vereinfacht und so zum **einfacheren Platznehmen oder Aufstehen** beitragen kann. Das Drehkissen funktioniert **bei Stühlen, auf Autositzen und im Bett**. Nehmen Sie zunächst seitlich auf dem Kissen Platz und **drehen Sie Ihre Beine dann bequem** unter einen Tisch oder ins Fahrzeuginnere. Auch das Aufstehen vom Tisch oder das Aussteigen aus dem Auto gelingt auf die gleiche Weise. Oder legen Sie das Drehkissen auf Ihr Bett, um für ein **angenehmeres Ein- und Aussteigen** zu sorgen, indem Sie die Beine zunächst anheben und dann auf die Liegefläche drehen.

Das **bequem gepolsterte** Drehkissen besteht aus zwei flexiblen und faltbaren Kisseanteilen, die in der Mitte so miteinander verbunden sind, dass sie aufeinander um **360 Grad gedreht** werden können. Die Unterseite des robusten Kissens ist für sicheren Halt auf jeder Unterlage mit einer **Antirutschbeschichtung** versehen. Diese Beschichtung ist besonders wichtig, damit das Kissen bei der Drehbewegung nicht verrutscht.

Das runde Sitzkissen hat einen **Durchmesser von ca. 44 cm**. Es ist flexibel und hat ein geringes Eigengewicht, das macht das Drehkissen auch **unterwegs zu einem unverzichtbaren Begleiter**. Die maximale Belastbarkeit des Drehkissens beträgt 100 kg. Die Reinigung erfolgt mittels eines feuchten Tuchs.

- Durchmesser ca. 44 cm
- Max. Belastung: 100 kg
- Farbe: dunkelblau
- Material oberes Kisseanteil: Baumwolle, Polyamid
- Material Innenseiten beide Kisseanteile: Nylon
- Verbindungselement: Kunststoffdrehscheibe
- Material unteres Kisseanteil: PU
- Material Füllung: Polyesterfüllung in beiden Kisseanteile
- Reinigung mit einem feuchten Tuch